

# HARTMANN



## Bacillo® 30 Sensitive Tissues

Materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher für sensible Oberflächen.



CE 0482

### Anwendungsgebiete

Die mit Bacillo® 30 Sensitive Foam getränkten gebrauchsfertigen Desinfektionstücher Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues aus dem Flowpack, benetzen die Flächen hervorragend und wirken schnell, sogar auf empfindlichen Oberflächen.

### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

### Produkteigenschaften

- 100 % plastikfreie Tücher
- Frei von Mikroplastik
- Schnell wirksam mit guten Reinigungseigenschaften
- Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien wie: Polycarbonat (PC), Acrylglas (PMMA) und Polysulfon
- Ohne Handschuhe anwendbar\*
- Hautverträglich & allergikerfreundlich – SGS Institut Fresenius\*\*- & ECARF-zertifiziert



Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
<b>Bakterien / Pilze</b>			
Bakterizid / levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
<b>Viren</b>			
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
<b>Lebensmittel / Industrie</b>			
Bakterizid / levurozid	EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.

\* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

\*\* Das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen



# Bacillol® 30 Sensitive Tissues



## Anwendung

Oberflächen mit den Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen. Nicht zur Hautreinigung verwenden. Nach Gebrauch Tissue der Abfallentsorgung zuführen. Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen.

## Haltbarkeit nach Anbruch

In geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate.

## Zusammensetzung

Wirkstoffe der Tränklösung:  
Ethanol 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g, Amine, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure (CAS-Nr. 139734-65-9) 2 mg/g

## Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit Bacillol® 30 Sensitive Foam:  
Flammpunkt (DIN EN ISO 3679) 30 °C  
Dichte (20 °C) ca. 0,95 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert (20 °C): ca. 8

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
<b>Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues</b>	120 Tücher Größe 17 x 20 cm	981 943	18851738	6
<b>Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues Big Pack</b>	160 Tücher Größe 18 x 20 cm	981 983	19262139	6
<b>Flowpack Wandhalter</b>	1 Wandhalter	981 205	09397045	1
<b>Flowpack-Halter flex</b>	1 Halter	981 899	-	10

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg  
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE